

# GUIDE UTILISATION DES LITS ELITIS, CAPSYS, CINETIS, ECOFIT




- Après mise en place du lit et des accessoires, vérifier leur fonctionnalité.
- Lors de l'installation chez le patient, prendre soin de bien informer l'utilisateur du fonctionnement du lit et de ses accessoires. Une bonne connaissance du produit peut éviter des incidents et des déplacements.
- En cas d'utilisation avec d'autres dispositifs, s'assurer qu'il n'y a pas de risque de perturbations mutuelles
- Veiller à ce que le lit soit placé dans un espace suffisant afin qu'il ne renverse pas les éléments disposés autour de lui, lors des montées et descentes.

## V - UTILISATION DU LIT ELITIS+

### 5.1 Conseils d'utilisation

- Le lit comporte de nombreuses pièces mobiles qui sont autant de sources de pincements, toujours être très attentif lors de leur manipulation et bien prendre connaissance de l'architecture du lit avant toute utilisation.
- Le lit interprète les actions qu'une personne exerce sur la télécommande (selon le cas 4 à 8 touches permettant la montée et la descente du sommier, du relèvement des jambes ou les 2 fonctions à la fois) ; son utilisation doit donc toujours être en cohérence avec son environnement.
- Les dispositifs de mise en mouvement du lit ne sont pas étanches à 100%, éviter de les exposer à des projections de liquides, quels qu'ils soient.
- Éviter le contact ou la proximité d'une source de chaleur importante lorsque les dossierets en bois sont installés.
- Débrancher le transformateur secteur dès que le lit n'est plus en service.

### 5.2 Utilisation de la télécommande :

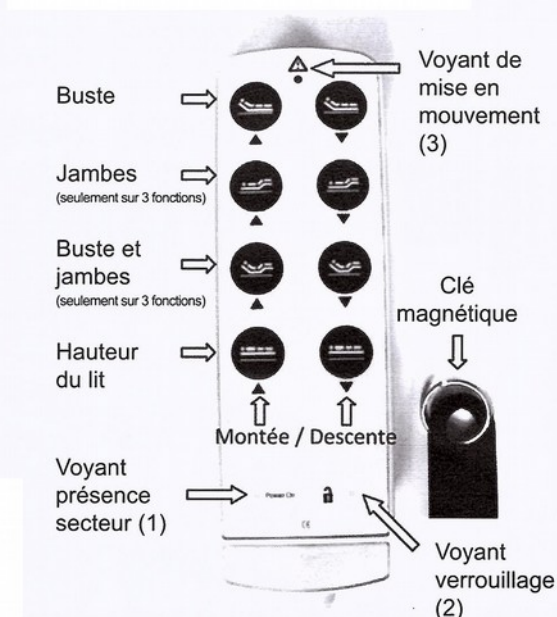

- Lorsque la prise de courant du lit est reliée à une prise de courant alimentée en 230 V, le voyant « présence secteur » s'éclaire en orange.

- (1) Voyant éteint = lit non branché ou défaut
- (2) Voyant éteint = télécommande verrouillée
- (3) Voyant éteint = pas de mouvement du lit

- Pour pouvoir actionner le lit il faut déverrouiller la télécommande en passant la clé magnétique à plat au dessus du voyant « verrouillage » qui s'éclaire en orange ou vert selon les télécommandes.


- Appuyer sur les boutons de la télécommande pour mettre en mouvement et positionner les parties de lit (buste – Hauteur – Jambes (3 fonctions) – Buste et jambes (3 fonctions)).  
Colonne de gauche pour faire monter la partie du lit sélectionnée.

Colonne de droite pour les faire descendre.

- Lâcher le bouton dès que la position souhaitée est obtenue. Le voyant de mise en mouvement s'allume en vert lorsque la télécommande est déverrouillée et qu'une touche est enfoncée .

**Une clé magnétique permet de verrouiller et déverrouiller la télécommande.**

- Lorsque le boîtier d'alimentation du lit (transformateur) est reliée à une prise de courant alimentée en 230 V, le voyant « présence secteur » s'éclaire en orange.

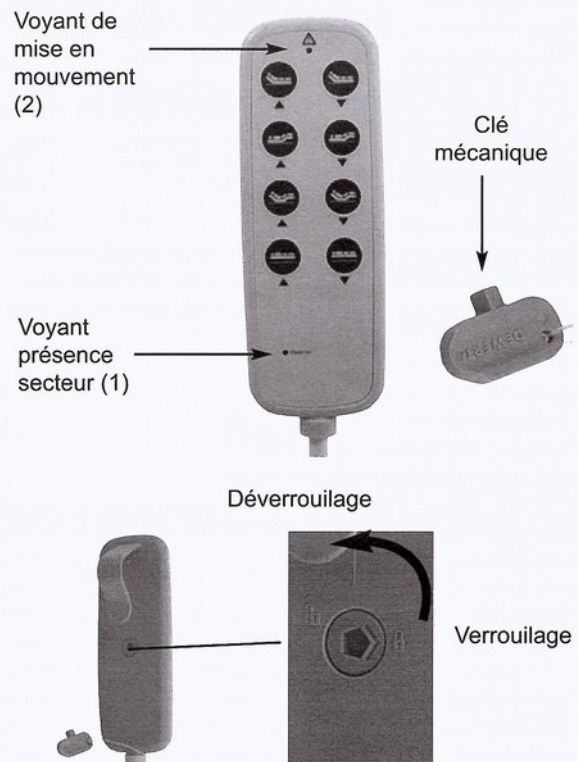

**(1) Voyant éteint = lit non branché ou défaut**

**(2) Voyant éteint = pas de mouvement du lit**

- Pour pouvoir actionner le lit il faut déverrouiller la télécommande. Au dos de la télécommande à l'aide la clé mécanique positionner la flèche du côté du schéma de verrou ouvert .

- Appuyer sur les boutons de la télécommande pour mettre en mouvement et positionner les parties de lit (buste – Hauteur – Jambes (3 fonctions) – Buste et jambes (3 fonctions)).

Colonne de gauche pour faire monter la partie du lit sélectionnée.

Colonne de droite pour les faire descendre.

- Lâcher le bouton dès que la position souhaitée est obtenue. Le voyant de mise en mouvement s'allume en vert lorsque la télécommande est déverrouillée et qu'une touche est enfoncée .

**Une clé mécanique fournie avec la télécommande permet de verrouiller et déverrouiller le verrou situé au dos de la télécommande .**

### 5.3 Problèmes susceptibles d'être rencontrés



**ATTENTION :** Le vérin ne doit être utilisé qu'en service discontinu 2 minutes de travail puis 18 minutes de repos.

- Pour un fonctionnement de 2 minutes, une pause de 18 minutes doit être respectée. Ne pas dépasser 2 minutes de fonctionnement en continu. Toute fréquence d'utilisation excédant le cycle ci-dessus peut entraîner une dégradation de l'ensemble de levage (vérin / boîtier de commande).

Cette dégradation est exclue de la garantie.

- En cas de surcharge ou de blocage du lit, un système de sécurité intégré au boîtier de commande se déclenche et interdit toute utilisation du lit.

Pour éviter un arrachement du connecteur du côté relève-buste lors de la montée du lit, au niveau du boîtier principal d'alimentation, vérifier que la longueur libre du câble entre le vérin et le boîtier d'alimentation est suffisante lorsque le lit est dans la position haute maximale.

### 5.4. Utilisation avec un lève-patient

Les lève-patients compatibles avec le lit ELITIS+ doivent avoir une hauteur de fourches inférieure à 125 mm.

## Consignes de sécurité

- ➔ Le lit doit toujours être branché sur une prise dédiée ; dans le cas où l'utilisation d'un adaptateur, d'une rallonge ou d'une prise multiple s'avère indispensable, vous devez vous assurer que ses caractéristiques sont adaptées à celles du lit (220-230 volts, 50/60 hertz).
- ➔ La fiche d'alimentation doit être débranchée avant tout déplacement du lit ; pendant le déplacement, le câble doit être enroulé sur l'enrouleur et ne doit pas être en contact avec le sol et les roulettes.
- ➔ Lors de toute manipulation, veillez à ne pas pincer les cordons électriques des moteurs et de la télécommande et à ne pas faire de nœuds.
- ➔ Lorsque le lit n'a pas à être déplacé, assurez-vous qu'au moins deux des quatre freins de roulettes sont enclenchés.
- ➔ Maintenez votre lit propre : en cas de salissures, nettoyez-le avec une éponge humide et du savon ou une lingette désinfectante.
- ➔ Vérifiez régulièrement l'état des câbles : si la moindre altération est constatée, ou si une intervention technique est nécessaire, contactez votre Technicien en appelant au numéro de téléphone noté au recto.
- ➔ Ne pas laisser à la disposition des enfants.
- ➔ Après avoir donné les soins au patient, le lit doit toujours être remis en position basse afin d'éviter les chutes.

**Votre lit médicalisé est un dispositif médical, destiné à améliorer les soins, votre mieux-être et votre confort : entretenez-le comme tel, à l'exclusion de toute autre fonction.**

**Votre responsabilité pourrait être engagée.**