

NOTICE D'UTILISATION DU LÈVE PERSONNE SAMSOFT +

⚠ Important : Cet appareil doit être utilisé avec des sangles (élément de sécurité) exclusivement fournies par Dupont Médical.

- Utilisation prévue:

- Cet appareil de transfert est destiné au transfert de patients à mobilité réduite ; il peut être utilisé avec un fauteuil roulant, un siège de douche ou un siège de WC.
- Le SAMSOFT+ doit être utilisé exclusivement en intérieur sur un sol plan stable et adhérent ; il doit être manipulé par un personnel compétent formé à l'utilisation de ce type d'appareils.



Photo n°3

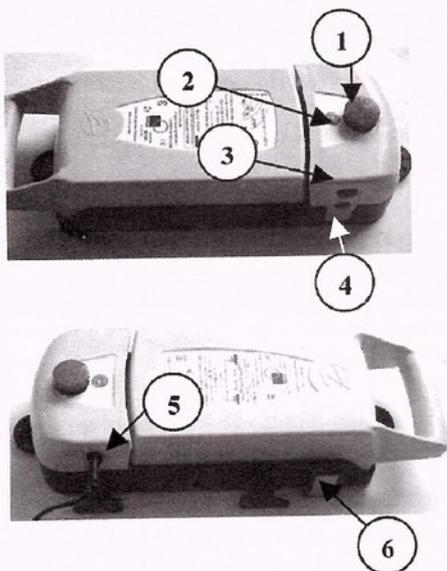


Photo n°2
Boîtier
d'alimentation

Mise en service :

- Lorsque tous les raccordements sont effectués :
- Faire fonctionner l'appareil avec la télécommande (si la led rouge apparaît mettre en charge).
- L'appareil est prêt à fonctionner.

Mise en charge :

⚠ LA MISE EN CHARGE DU BOITIER EST A EFFECTUER CHAQUE SOIR

Effectuer cette opération dans un local bien aéré, vérifier l'état du cordon secteur avant de le brancher

- Brancher le cordon d'alimentation au secteur 220 volts.
- Lorsque la charge est terminée la led verte s'allume puis s'éteint après déconnexion de la fiche secteur.
- Enrouler le cordon d'alimentation du secteur sur le côté du boîtier.
- L'appareil est à nouveau prêt à fonctionner.

⚠ LORS DE LA MISE EN CHARGE DE L'APPAREIL, IL EST IMPOSSIBLE DE S'EN SERVIR

Problèmes rencontrés

- Dans le cas où la télécommande ne peut faire redescendre le patient, appuyer sur le bouton descente d'urgence.
- Si le voyant rouge s'allume lors d'une levée ou descente, mettre l'appareil en charge.
- La télécommande ou le vérin ne fonctionne pas, vérifier les connexions.

EN CAS DE PROBLEME LORS D'UNE LEVEE OU DESCENTE AVEC UN PATIENT SE SERVIR DE L'ARRET D'URGENCE EN APPUYANT DESSUS ET LE REARMER EN LE POUSSANT UNE NOUVELLE FOIS.

TRANSFERT D'UN PATIENT :

Avant de procéder à la mise en place et au transfert du patient, s'assurer que:

- le poids du patient est compatible avec la charge maximum admissible par ce lève patient -150 kg maxi-
- les batteries sont chargées et que l'appareil est parfaitement opérationnel
- le sol est stable et plat -les freins de l'appareil sont fonctionnels
- Vérifier que la sangle est compatible avec le SAMSOFT + sangle DUPONT MEDICAL.
- Vérifier que les attaches de la sangle et les éléments de soutien du patient, sont en parfait état
- Vérifier, dans le carnet d'entretien inclus dans ce manuel, qu'une maintenance régulière est effectuée une fois par an au moins.
- Si le patient est agité, un accompagnateur doit sécuriser le déplacement du patient

Ces vérifications effectuées, vous pouvez transférer le patient :

 **ATTENTION : Ecarter au maximum l'embase de l'appareil avant de lever ou déplacer le patient, ne pas mettre les freins de roues. Ne pas poursuivre la montée ou descente du patient si les 4 roues ne sont pas en appui sur le sol. La levée doit se faire très progressivement en vérifiant que le patient est bien positionné dans la sangle et qu'il n'y a pas de risque de basculement lié à un porte-à-faux excessif.**

1) Ecartement de l'embase :

- Appuyer sur la pédale d'écartement pour ouvrir ou fermer l'embase du SAMSOFT +

2) Transfert du patient d'un lit vers un fauteuil :

- Positionner le patient sur le côté.
- Placer la sangle sous le patient.
- Vérifier que la partie dorsale de la sangle soit bien positionnée (des épaules au coccyx).
- Rallonger le patient.
- Passer chaque jambette sous chaque cuisse du patient en les croisant.
- Croiser les boucles d'attache de chaque jambette entre elles.
- Positionner l'appareil au niveau du patient.
- Accrocher chaque boucle de la sangle sur les crochets du palonnier **en vérifiant que les clips anti-retour empêchent les boucles de sortir des crochets.**
- Le patient est prêt à être transféré du lit vers un fauteuil.

3) Transfert du patient d'un fauteuil vers un lit :

- Basculer le patient vers l'avant tout en le maintenant.
- Faire glisser la sangle dans le dos du patient jusqu'au niveau du coccyx.
- Passer chaque jambette sous chaque cuisse du patient en les croisant.
- Croiser les boucles d'attache de chaque jambette entre elles.
- Positionner l'appareil au niveau du patient.
- Accrocher chaque boucle de la sangle sur les crochets du palonnier en vérifiant que les clips anti-retour empêchent les boucles de sortir des crochets.
- Le patient est prêt à être transféré d'un fauteuil vers un lit.

Points particuliers :

- Lors de la mise en place de la sangle vérifier que celle-ci ne fasse pas de plis au niveau des jambes afin de ne pas blesser le patient.
- Ne pas mettre les freins de l'appareil lors de la levée de façon que celui-ci se positionne correctement vis à vis du patient.

ATTENTION LORS D'UNE LEVEE DESCENTE NE JAMAIS METTRE LES FREINS DES ROUES POUR QUE L'APPAREIL SE POSITIONNE CORRECTEMENT DANS L'AXE DU PATIENT.

EN CAS DE PROBLEME D'ALIMENTATION ELECTRIQUE, IL EST POSSIBLE DE DESCENDRE OU MONTER MANUELLEMENT LA FLECHE EN APPUYANT ET EN TOURNANT LA BAGUE ROUE SITUEE A L'EXTRE-MITE DE LA TIGE DU VERIN.

4) Transfert d'un patient allongé sur le sol :

 **ATTENTION**, lors du ramassage d'un patient couché sur le sol il y a un risque de basculement de l'appareil. **Le poids du patient ne doit pas excéder 130 Kg** et le lève-patient doit être placé de telle sorte que la tête et le buste du patient soient situés à l'intérieur des longerons. Effectuer la montée très progressivement en veillant à ce que le patient reste bien positionné à l'intérieur des sangles